

SJUKVÅRDSTÅLT 4-SYSTEMET

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Sjukvårdstålt op 1 MT	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Sjukvårdstålt 4 MT	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Kopplingstålt 4 MT	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Ljussluss sjvt 4 MT	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Kopplingsdel sjvt 4-4	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Kopplingsdel sjvt 4-3	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Strålskydd 4/S	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Mörkrumstålt MT	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Draperi sjvt 4/S	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1
Högtrycksfläkt	0	Klapp	Orig	Kallfd	2	4	3
Reparationssett sjvt 4/S	0	Klapp	Orig	Kallfd	3	2	1

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Vårdpublikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Plast, gemensamt	M7782-122101 PLAST GEMENS

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
	Bruksanvisning sjukvårdstält 4-systemet

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Sätt upp uppblåsbara komponenter.
- Avsyna tältkonstruktionerna. Lägg särskild vikt vid eventuella hål eller revor och läckage i innerslangar.
- Avsyna kopplingsdelarna.
- Kontrollera befintlighet enligt sats- och tillbehörslista.
- Gör ren materielen enligt bruksanvisning.
- Packa materielen enligt bruksanvisning.
- Tälten förvaras lämpligen på lastpallar i förrådshyllor eller kompaktstaplas. Pallställ skall dock användas vid kompaktstapling.
- För att förhindra tryckskador på plasten är det dock förbjudet att utan pallstöd förvara mer än ett tält i höjdd. (Sjukvårdstält 4 vikt ca 217 kg, kopplingstält 4 vikt ca 247 kg.)
- För att undvika skador av gnagare bör tälten förvaras något över golvhöjd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

- Sätt upp uppblåsbara komponenter.
- Avsyna tältkonstruktionerna. Lägg särskild vikt vid eventuella hål eller revor och läckage i innerslangar.
- Avsyna kopplingsdelar.
- Kontrollera befintligheten enligt sats- och tillbehörslista.
- Packa materielen enligt bruksanvisningen.
- Materielen förvaras i förråd enligt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

Vart 8:e år

- Utför fullständig funktionskontroll på högtrycksfläkten.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Provres om möjligt tält och ljusslussar.

Kontrollera materielens befintlighet enligt sats- och tillbehörslista.