

SJUKVÅRDSTÄLT 8

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
SJUKVÅRDSTÄLT 8	0	0	Orig	Tluft:9	2	TB	Lev

Avgränsningar

Inga avgränsningar.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Sjukvårdstält 8 skall vid transport vara packad i dess transportfodral.

Förvaringsmetod

Utrustningen skall förvaras i en temperatur mellan +4 °C och +35 °C.
Utrustningen skall förvaras i avfuktat förråd.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser vårdpublikationer

Publikation	F-bet/F-ben (länkade)
Grundtillsyn	M7782-017341 MVSCHG SJVTÄLT 8
Daglig och särskild tillsyn	M7782-017342 MVSCHDS SJVTÄLT 8

Referenser övrigt

Publikation	F-bet/F-ben
Instruktionsbok	M7786-024221 IBOK SJVTÄLT 8

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Innan förrådsställning måste all ingående utrustning rengöras och torkas innan de packas i respektive emballage. Detta är speciellt viktigt när det gäller täten och innergolven. Om utrustningen inte är torr finns risk för mögelskador.

Rengör tälduken ut- och invändigt med vatten och hushållsrengöringsmedel. Max + 70°C vattentemperatur.

Innertältet tvättas vid behov i industritvättmaskin.

Förrådsställning

Öppna förvaringslådornas lock och låt dem vara öppna på glänt.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Varannat år

Utför uppsättning av tätsystemet, daglig- och särskild tillsyn samt brytning, se under avsnitten Handhavande och Vård i instruktionsboken.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Inga särskilda riktlinjer.