

AUTOKLAVER

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Autoklav 2 kW	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	TB	Cvst
Autoklav 5,5 kW	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst
Autoklaver enligt objektförteckning	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	8	TB	Cvst
Snabbautoklav	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst

Avgränsningar

Objektförteckning

- Autoklav el 12 kW
- Autoklav fotogen
- Autoklav fält 1 och 73

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsynen skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera kablar och anslutningar.
- Gör ren materielen.
- Funktionsprova materielen.

- Autoklav 5,5 kW MT konserveras med 50% glykol enligt bruksanvisning.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år resp 8:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärdas i fredstid och vid mobilisering

Autoklav 5,5 kW MT skall funktionskontrolleras enligt bruksanvisning varvid glykolen avlägsnas och sköljning av systemet utförs innan slangar monteras (se bruksanvisning).