

MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 2

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Allmänt

— **OBS** —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— **VARNING** —

**Iakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M2310-505010 DESTAPPARAT EL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M6709-710010 ULTRALJUDSTVÄTT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7550-154010 HANDTVÄTTST FÄLT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7550-154110 HANDTVÄTTST FÄLT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7830-111010 DISKDESINFEKTOR M	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-113010 SPOLDESINFEKTOR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-276010 AUTOKLAV MELAG	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-278110 AUTOKLAV	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-279010 AUTOKLAV, SPECIAL	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7830-291010 AUTOKLAV 1	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7830-813011 STERILBORD /T	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7880-602010 RENG O DESINFENHET	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7880-603110 SMÖRJ F HAND/K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7886-536110 TANDSTAN- APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning. Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Autoklaver skall förrådshållas med stängd men ej reglad lucka.

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Vårdpersonal

Endast personal med för materielen särskild utbildning.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7780-006661	HANDH MCS SE
2	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7775-001900	PIS AUTOKLAV
5	M7775-002300	PIS AUTOKLAV /T
6	M7775-001220	PIS AUTOKLAV, SPEC
7	M7775-002180	PIS BÄRBAR SUG /T
8	M7775-001780	PIS DESTAPPARAT EL
9	M7775-001240	PIS STERILISERUTR ¹
10	M7786-032091	ANVMAN HANDTVÄTTST FÄLT T
11	M7786-265261	IBOK STERILBORD

1 Innehåller packinstruktion för Diskdesinfektor och Autoklav monterade i Sterilutr /K.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Packa materielen
- Vårdmarkera

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Packa materielen
- Vårdmarkera

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
 - Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
 - Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
 - Töm apparaten på vätska²
 - Torrtorka
 - Packa materielen
 - Vårdmarkera
- 2 Tillägg för destillationapparat: Kontrollera att kondensorn är tömd.

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
 - Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
 - Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
 - Töm apparaten på vätska³
 - Torrtorka
 - Packa materielen
 - Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
 - Vårdmarkera
 - Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv
- 3 Tillägg för destillationapparat: Kontrollera att kondensorn är tömd.