

MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 4

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Allmänt

— **OBS** —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— **VARNING** —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäll	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2303-137010 REDUCERVENTIL TYPG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	5	Fdm:9	Fd
M2303-197110 REDUCERVENTIL 6	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	5	Fdm:9	Fd
M2303-606110 REDUCERVENTIL TG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	5	Fdm:9	Fd
M2758-827010 UNDERSÖKNINGS- LAMPA	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M2758-844010 UNDERSÖKNLAMPA 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M2758-828010 BELYSNING KOMPAKT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3001-802130 FÖRSTGLAS M LAMPA	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3533-754010 MANOMETER ENDOTRAK	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3835-404010 KAMERA HANDSTYCKE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M6576-155010 PLASTSVETSAPP STEP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M6576-159010 IMPULSSVETS	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7880-110010 KIRURGIENHET /K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7813-142020 VÄRMESKÅP LÄKEM	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7833-133010 CENTRIFUG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-231010 SUGPUMP 1	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-306010 VENTILATOR TRANSPAC	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	Fdm:9	Fd
M7835-317011 INHALATOR /K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-802010 LUNGFUNKT- PROVARE	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	4	Fdm	Fd
M7835-990618 DEMANDVENTIL LSP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7839-118010 BLODÅTERV- MASKIN	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	TB	Cvst
M7839-118110 BLODÅTERV- MASKIN	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	TB	Cvst
M7884-201010 ELKIRURGI- UTRUSTN /K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	TB	Cvst
M7880-261010 KAPSELBLANDARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7884-211010 KIRGENH DENTAL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	TB	Cvst

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning.
Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Vårdpersonal

Endast personal med för materielen särskild utbildning.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7780-006661	HANDH MCS SE
2	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7775-001840	PIS REDUCERVENTIL TYP G
5	M7775-001100	PIS UNDERSÖKNLAMPA
6	M7775-001140	PIS MANOMETER ENDOTRAK
7	M7775-001180	PIS PLASTSVAPP STEP
8	M7775-001580	PIS BLODÅTERVMASKIN
9	M7775-002080	PIS KIRGENH DENTAL

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Genomför sterilisering¹
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

1 Gäller M7880-110010 KIRURGIENHET /K enligt MVSCHD, åtgärd Förvaring

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan²
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen

— VARNING —

Vid materiel som alstrar värme, tillse att materielen har svalnat innan den packas. Risk för brand eller brännskada.

- Packa materielen
 - Vårdmarkera
- 2 För flyggodkänd materiel, kontrollera även märknings befintlighet och läsbarhet.

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan³
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen

— VARNING —

Vid materiel som alstrar värme, tillse att materielen har svalnat innan den packas. Risk för brand eller brännskada.

- Packa materielen
 - Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
 - Vårdmarkera
 - Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv
- 3 För flyggodkänd materiel, kontrollera även märknings befintlighet och läsbarhet.