

MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 11

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Allmänt

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Ta del av gällande AFS:er (Arbetsmiljöverket)

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7835-314010 VENTILATOR 9	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7835-315010 VENTILATOR 10	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-264010 BLODANALYSINSTR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-264110 BLODANALYSINSTR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-265010 KEMIINSTR STORT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-318110 BLODGLUKOS- MÄTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-321010 BLODGLUKOS- MÄTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-327010 LEUKOCYTMÄTARE 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-330010 BLÅSVOLYM- SCANNER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-365110 KEMIINSTR LITET	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-401110 BLODTRYCKSMÄT AUT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-533010 DEFIBR HEART FR2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-537010 KAPNOMETER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-537110 KAPNOGRAF 1	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7838-538010 DEFIBRILL MDRE AUT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-541010 DEFIBRILLATOR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	Fdm:9	Fd
M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-559010 EKG APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-561010 EKG APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-562010 ARB EKG APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-567010 ÖVERVAKNINGSM 567	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-805010 ULTRALJUDSUTR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-806010 ULTRALJUDSUTR 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-820010 ULTRALJUDSUTR 4	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning. Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Urtagna batterier hanteras enligt MVIF - Elektroteknisk materiel

M7782-124003 ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA

M7782-124011 BLYBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124013 BLYBATTERIER FYLLEDA

M7782-124021 TORRBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124022 BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER

M7782-124023 LITIUMBATTERIER

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Vårdpersonal

Endast personal med för materielen särskild utbildning.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
2	M7780-006661	HANDH MCS SE,
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7782-124003	ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA
5	M7782-124011	BLYBATTERIER GEMENSAMT
6	M7782-124013	BLYBATTERIER FYLLDA
5	M7782-124021	TORRBATTERIER GEMENSAMT
6	M7782-124022	BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER
7	M7782-124023	LITIUMBATTERIER
8	M7775-001380	PIS BLODANALYSINSTR
9	M7775-001420	PIS BLODGLUKOSMÄT
10	M7775-001740	PIS BLODGLUKOSMÄT
11	M7775-001480	PIS DEFIBRILLAT MIN
12	M7775-001560	PIS ULTRALJUDSUTR

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Demontera batterier^{1, 2}
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

1 Inbyggt batteri och batteriladdare ska ej demonteras för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.

2 Batteri demonteras ej, kontinuerlig underhållsladdning vid förvaring, gäller för M7835-314010 VENTILATOR 9 och M7835-315010 VENTILATOR 10.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera batterier, om nödvändigt ladda³
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Demontera batterier^{4, 5}
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

3 Batteriladdare/elektroder ska bytas för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.

4 Inbyggt batteri och batteriladdare ska ej demonteras för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT

5 Batteri demonteras ej, kontinuerlig underhållsladdning vid förvaring, gäller för M7835-314010 VENTILATOR 9 och M7835-315010 VENTILATOR 10.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera batterier, om nödvändigt ladda⁶
- Kontrollera konfiguration och programvaruversion, uppdatera vid behov
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Packa materielen
- Vårdmarkera

6 Batteriladdare/elektroder ska bytas för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera nya batterier, om nödvändigt ladda⁷
- Kontrollera konfiguration och programvaruversion, uppdatera vid behov
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv

7 Batteriladdare/elektroder ska bytas för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.