

## MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 14

### MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

#### Allmänt

— **OBS** —

**Korttidsförvaring**

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— **VARNING** —

**Iakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

## Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se  
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäll	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2875-291010 FRYS F BLOD/ PLASMA	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M2875-333110 LÄKEMKYLSK 70L H	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M2875-333210 LÄKEMKYLSK 70L V	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M2875-351010 KYLBOX TP 32L	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd
M2875-354010 KYLBOX TP 22L	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd
M2875-363010 LÄKEMKYLSK 320L H	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M2875-363110 LÄKEMKYLSK 320L V	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M2875-370010 LÄKEMKYLSK 286L H	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M2875-370110 LÄKEMKYLSK 286L V	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M2875-818010 LÄKEMKYLSK 210	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd
M7838-401030 BLODTRYCKSMÄT 3	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd
M7838-401060 BLODTRYCKSMÄT 6	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd
M7838-406011 BLODTRYCKSMÄT 9 /T	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd
M7838-402010 BLTRMÄT M UTB MAN	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd
M7869-535310 INFSTATIV IDA	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	8	Fdm	Fd

## Särskilda riktlinjer

### Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning.  
Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

### Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

### Förvaringsmetod

Förvaras frysfritt.

## Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

<b>Ref</b>	<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
1	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
2	M7780-006661	HANDH MCS SE,
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Tövattenbehållare töms<sup>1</sup>
- Lock/dörr ställs på glänt<sup>2</sup>
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

1 Gäller kylskåp.

2 Gäller kylboxar, kylskåp och frysar.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Kontrollera att lock/dörr står på glänt<sup>3</sup>
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

3 Gäller kylboxar, kylskåp och frysar.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Genomför funktionskontroll på materielen
- Packa materielen
- Vårdmarkera

### Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Genomför funktionskontroll på materielen
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv