

BORRM INTROSS NÅL

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
| M7840-332010 | BORRM INTROSS NÅL |

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

| Ref | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Gäller för |
|-----|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 | M7786-006601 | BANV BORRM INTROSS | M7840-332010 |
| 2 | M7782-112007 | KORTTIDS FÖRV | M7840-332010 |
| 3 | M7777-716110 | TL F M7840-332011 | M7840-332010 |

Drift- och förvaringsmiljö

| Miljö | Värde | Gäller för |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Omgivningstemperatur vid drift | -20 °C till 50 °C | M7840-332010 |
| Transport- och förvaringstemperatur | -20 °C till 50 °C | M7840-332010 |
| Övrig information | - | M7840-332010 |

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

| Nr | Beteckning | Benämning | Gäller för |
|----|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | - | Luddfri trasa | M7840-332010 |
| 2 | M0842-220319 | YTDESINFEKTION PLUS | M7840-332010 |
| 3 | - | Steril bomullstopp eller motsvarande | M7840-332010 |

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Indikatorlampa Kontroll.
Se Ref 1 avsnitt "INDIKATORER & VARNINGAR".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt "SKÖTSEL OCH RENGÖRING".
Använd vårdmateriel nr 1, nr 2 och nr 3.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 2.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad,
förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER