

AUTOKLAV 1

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
| M7830-291010 | AUTOKLAV |

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt tillbehörslista.

Referenser

| Ref | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Gäller för |
|-----|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | M7786-041621 | ANVMAN AUTOKLAV 1 | M7830-291010 |

Daglig tillsyn

Före användning

- Vid upprättande Se avsnitt "Särskild tillsyn".
- Autoklav Om autoklaven har varit avstängd mer än en dag, kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare.
- Hela enheten Okulärbesiktning.
- Vattenförsörjning Kontroll nivå. Se Ref 1 avsnitt "Vattenförsörjning".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Okulärbesiktning.
- Hela enheten Rengöring. Se Ref 1 avsnitt "Varje dag".
- Kranvattenbehållare Tömning. Se Ref 1 avsnitt "Vattenpåfyllning".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Körning Kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare regelbundet, dock minst två gånger per månad.
- Frysritt Materielen ska förvaras i utrymme utan frysrisk.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än 1 månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid upprättande

1. Hela enheten Installation. Se Ref 1 avsnitt "Installationsanvisningar".
2. Hela enheten Igångsättning. Se Ref 1 avsnitt "Drifanvisningar".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid transport

3. Avloppsvattentank Tömning. Se Ref 1 avsnitt "Lyfta och bära autoklav".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje vecka

4. Vakuumpumpbehållare Tömning och fyllning. Se Ref 1 avsnitt "Varje vecka av operatören".
5. Luckstift, lucktätningsbult Smörjning. Se Ref 1 avsnitt "Varje vecka av operatör".
6. Hela enheten Rengöring. Se Ref 1 avsnitt "Varje vecka av operatör".
7. Kammare Avkalkning. Se Ref 1 avsnitt "Varje vecka av operatör".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

8. Vattenutloppssil Rengöring. Se Ref 1 avsnitt "Rengöra filtret för vattenutloppet".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 6:e månad eller 1000 cykler

9. Luftfilter Byte. Se Ref 1 avsnitt "Ersätta HEPA-luftfiltret".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER