

MOTTAGNINGSUSTRUSTNING 5 /S

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8289-054110	MOTTAGNUTR 5 /S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel Kontroll renhet, skador och utgångsdatum. Ersätt utgången förbrukningsmateriel.
- M7838-401030 BLODTRYCKSMÄT 3 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- BLODTRYCKSMÄT 9 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
- M7849-306010 LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats Inventering enligt M7777-716320 SL F M8289-054110.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- M7838-401030 BLODTRYCKSMÄT 3 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- BLODTRYCKSMÄT 9 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
- M7849-306010 LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M7838-401030 BLODTRYCKSMÄT 3 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- BLODTRYCKSMÄT 9 Se M7782-701412 MVSCHD BLODTRYCKSM.
- M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
- M7849-306010 LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
- M7838-537110 KAPNOGRAF Se M7782-701312 MVSCHD KAPNOMETER.
- M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.
- Batterier övrig materiel Demontering.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Anm

Kontrollera att vårdintervallen i materielvårdsschema detta schema stämmer med aktuell utgåva av angivna materielvårdsscheman.

Varje månad

1. M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE Se M7782-700572 MVSCHDS ÖVERVAKNMON.
2. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 4:e månad

3. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov

4. M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
5. M7849-306010 LARYNGOSKOP FIBEROP Se M7782-039442 MVSCHDS SJVM ALLM.
6. M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE Se M7782-700562 MVSCHDS DEFIBR MIN.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER