

SPRUTPUMP

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7858-516010	SPRUTPUMP 3
M7858-518010	SPRUTPUMP 4

Allmänt

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7780-026011	BANV SPRUTPUMP T34L	M7858-516010
2	M7777-716370	TL F M7858-516011	M7858-516010
3	M7786-018201	BANV SPRUTPUMP T34	M7858-518010
4	M7777-716490	TL F M7858-518011	M7858-518010
5	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	5 °C till 40 °C	M7858-516010
	15 °C till 40 °C	M7858-518010
Transport- och förvaringstemperatur	-25 °C till 50 °C (upp till en vecka) 15 °C till 40 °C (längre än en vecka)	M7858-516010
	-25 °C till 55 °C	M7858-518010
Övrig information	Se Ref 1 avsnitt "Q – Specifikationer för T34L sprutpump" sid 26 (sid 26).	M7858-516010
	Se Ref 1 avsnitt "Q – Specifikationer" sid 24 (sid 24).	M7858-518010

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla
4	-	Mjuk tandborste eller motsvarande	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- M7858-516010: Vid batteridrift Kontroll batteristatus, laddning vid behov.
Se Ref 1 avsnitt "H – Rekommenderade batterier, passning och testning" sid 10-11 (sid 10-11).
- M7858-518010: Batteri Kontroll batteristatus, byte batteri vid behov.
Se Ref 3 avsnitt "Batteritest" sid 12 (sid 12) och avsnitt "Sätta i batteriet" sid 12 (sid 12).
- Hela enheten Rengöring.
 - Se Ref 1 avsnitt "Rengöring" sid 27 (sid 27).
 - Se Ref 3 avsnitt "Mellan patienter" sid 26 (sid 26).Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2 eller nr 3.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Sprutpump Kontroller under infusion.
 - Se Ref 1 avsnitt "L – Rekommenderade kontroller under infusion" sid 20-21 (sid 20-21) och avsnitt "N – Larmförhållanden" sid 23 (sid 23).
 - Se Ref 3 avsnitt "L – Rekommenderade kontroller under infusion" sid 19 (sid 19) och avsnitt "O– Larmförhållanden" sid 22 (sid 22).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.

- Hela enheten Rengöring.
 - Se Ref 1 avsnitt "Rengöring" sid 27 (sid 27).
 - Se Ref 3 avsnitt "Mellan patienter" sid 26 (sid 26).Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2 eller nr 3. Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
- M7858-516010: Vid batteridrift Kontroll batteristatus, laddning vid behov. Se Ref 1 avsnitt "H – Rekommenderade batterier, passning och testning" sid 10-11 (sid 10-11).
- Tillbehör Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 5.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M7858-516010: Batteri Kontinuerlig underhållsladdning. Se Ref 1 avsnitt "H – Rekommenderade batterier, passning och testning" sid 10-11 (sid 10-11).
- M7858-518010: Batteri Demontering. Se Ref 3 avsnitt "Sätta i batteriet" sid 12 (sid 12).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Varje månad eller vid behov

1. Sprutpump

Rengöring av gängorna på ledskruven (gängad stång i metall) och de två guideledarna (släta stänger i metall).

- Se Ref 1 avsnitt "Rengöring" sid 27 (sid 27).
- Se Ref 3 avsnitt "Månatlig rengöring" sid 26 (sid 26).

Använd vårdmateriel nr 4.

Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER