

GASFLÖDESTESTARE

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3560-315010	GASFLÖDESTEST 2

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-974010	VT305 USERS MANUAL	M3560-315010
2	M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV	M3560-315010

Drifts- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	15 - 40 °C	M3560-315010
Transport- och förvaringstemperatur	-10 - 60 °C	M3560-315010
Luftfuktighet vid drift	10% till 90% relativ, icke-kondenserande	M3560-315010
Luftfuktighet vid förvaring	5% till 95% relativ, icke- kondenserande	M3560-315010
Vibrationer	-	M3560-315010
Damm	-	M3560-315010
Övrig information	För övrig information, se Ref 1 avsnitt "Specifications" sid 47- 50 (61-64).	M3560-315010

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	M3560-315010

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell tillbehörslista och/eller aktuell grund- och förvaltningsdata.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Okulärbesiktning avseende skador. Se Ref 1 avsnitt "Safety Information" sid 2 (16).
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd. Se detta schema avsnitt "Drifts- och förvaringsmiljö", sid 2 (16).
- Batteri Kontrollera batteriets laddning. Se Ref 1 avsnitt "Power Supply" sid 5 (19).
- Bakteriefilter Kontrollera, byt vid behov. Se ref 1 avsnitt "Preventive Cleaning and Maintenance" sid 44- 45 (58-59).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Bakteriefilter Använd filter.
- Batteri Kontrollera batteriets laddning. Se Ref 1 avsnitt "Operation" sid 11 (25).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Okulärbesiktning avseende skador. Se Ref 1 avsnitt "Safety Information" sid 2 (16).
- Hela enheten Rengöring avsnitt "Care and Maintenance" se ref 1 sid 44. Använd Vårdmateriel nr 1. Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 3 (17).
- Tillbehör Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 2.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drifts- och förvaringsmiljö", sid 2 (16).
- Avfuktning Materielen ska förvaras i avfuktat utrymme.
- Batteri Batteriet ska demonteras vid förvaring längre än en månad.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Varje månad

1. Bakteriefilter Kontrollera, byt vid behov. Se ref 1 avsnitt
“Preventive Cleaning and Maintenance” sid
44- 45 (58-59).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER