

KYLBOX TP

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|------------------|
| M2875-351010 | KYLBOX TP 32L |
| M2875-354010 | KYLBOX TP 22L |

Allmänt

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

| Ref | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Gäller för |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | M7786-030591 | ANVMAN KYLBOX TP32 | Alla |
| 2 | M7782-112007 | KORTTIDS FÖRV | Alla |
| 3 | M7777-713110 | TL F M2875-351011-1 | M2875-351010 ingående i M2875-351011 |
| 4 | M7777-714590 | TL F M2875-351012-9 | M2875-351010 ingående i M2875-351012 |
| 5 | M7777-714810 | TL F M2875-354011-8 | M2875-354010 |

Drift- och förvaringsmiljö

| Miljö | Värde | Gäller för |
|-------------------------------------|---|------------|
| Omgivningstemperatur vid drift | -15 till 55 °C | Alla |
| Transport- och förvaringstemperatur | -15 till 55 °C | Alla |
| Övrig information | Se Ref 1 avsnitt "Tekniska data" sid 165 (sid 165). | Alla |

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

| Nr | Beteckning | Benämning | Gäller för |
|----|-------------|--|------------|
| 1 | - | Luddfri trasa | Alla |
| 2 | Tvållösning | Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande | Alla |

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Hela enheten Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt "8 Rengöring och skötsel" sid 162 (sid 162).
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Hela enheten Kontrollera temperatur.
Se Ref 1 avsnitt "7.5 Använda kylcontainern" sid 159 (sid 159).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Hela enheten Kontrollera temperatur.
Se Ref 1 avsnitt "7.5 Använda kylcontainern" sid 159 (sid 159).
- Hela enheten Avfrostning vid behov.
Se Ref 1 avsnitt "7.8 Ställa in manuell avfrostning" sid 160 (sid 160) och avsnitt "7.10 Avfrosta kylcontainern" sid 161 (sid 161).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt "8 Rengöring och skötsel" sid 162 (sid 162).
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 2.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Förvaring Kylboxen ska förvaras med ej helt tillslutet lock.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER