

## DEFIBRILLATOR HEART FR2

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning    |
|-------------------|---------------------|
| M7838-533010      | DEFIBRILL HEART FR2 |
| M7838-570010      | DEFIBRILLATOR 3     |

### Allmänt

#### — VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

### Referenser

| Ref | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning    | Gäller för   |
|-----|-------------------|---------------------|--------------|
| 1   | M7780-703611      | BANV DEFIBR H FR2   | M7835-533010 |
| 2   | M7777-709940      | TL F M7838-533011-5 | M7835-533010 |
| 3   | M7786-076031      | IBOK DEF 3          | M7838-570010 |
| 4   | M7777-592570      | TL F M7838-570011   | M7838-570010 |
| 5   | M7782-112007      | KORTTIDS FÖRV       | Alla         |

## Drift- och förvaringsmiljö

| Miljö                               | Värde   | Gäller för |
|-------------------------------------|---|------------|
| Omgivningstemperatur vid drift      | 0 - 50 °C   | Alla       |
| Transport- och förvaringstemperatur | 0 - 43°C (standby med batteri installerat och förvarad med defibrilleringselektroder)   | Alla       |
| Övrig information                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Se Ref 1 avsnitt "Miljö" sid B1-B2 (sid 72-73).</li><li>Se Ref 3 avsnitt "ENVIRONMENTA L" sid B-1 (sid 63).</li></ul> | -          |

## Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

## Vårdmateriel

| Nr | Beteckning   | Benämning  | Gäller för   |
|----|--------------|--|--------------|
| 1  | -            | Luddfri trasa  | M7838-533010 |
| 2  | M0842-220319 | YTDESINFEKTION PLUS  | M7838-533010 |
| 3  | Tvållösning  | Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande | M7838-533010 |

## Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

## Daglig tillsyn

### Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd. Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Hela enheten Kontrollera statusindikatorn.
  - Se Ref 1 avsnitt "Kontrollera statusindikatorn." sid 4-15 (sid 40)
  - Se Ref 3 avsnitt "Check the Status Indicator." sid 4-2 (sid 24).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Under användning

- Hela enheten Kontrollera statusindikatorn.
  - Se Ref 1 avsnitt "Kontrollera statusindikatorn." sid 4-15 (sid 40)
  - Se Ref 3 avsnitt "Check the Status Indicator." sid 4-2 (sid 24).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Efter användning

- Elektroder Koppla loss från enhet.
- Tillbehör Inventera avseende skador och utgångsdatum.
- Tillbehör Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
  - Se Ref 1 avsnitt "Rengöring av Heartstream FR2" sid 4-18 (sid 43).
  - Se Ref 3 avsnitt "CLEANING THE HEARTSTART FR2+" sid 4-3 (sid 25).Använd vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3. Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

- Hela enheten  
Om defibrillering skett: Genomför självtest (ta ur och sätt i batteriet och genomför självtest).
  - Se Ref 1 avsnitt "Köra självtestet efter batteriinstallation" sid 2-5 (sid 18).
  - Se Ref 3 avsnitt "BATTERY INSERTION SELFTEST" sid 4-5 - 4-7 (sid 27-29).

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Förvaring

- Korttidsförvaring  
Se Ref 5.
- Förvaringstemperatur  
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning  
Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Särskild tillsyn

#### Varje månad

1. Hela enheten  
Kontroll skador och fastsättning.
2. Hela enheten  
Kontrollera statusindikatorn.
  - Se Ref 1 avsnitt "Kontrollera statusindikatorn." sid 4-15 (sid 40)
  - Se Ref 3 avsnitt "Check the Status Indicator." sid 4-2 (sid 24).
3. Hela enheten  
Genomför självtest (ta ur och sätt i batteriet och genomför självtest).
  - Se Ref 1 avsnitt "Köra självtestet efter batteriinstallation" sid 2-5 (sid 18).
  - Se Ref 3 avsnitt "BATTERY INSERTION SELFTEST" sid 4-5 - 4-7 (sid 27-29).
4. Tillbehör  
Inventera avseende skador och utgångsdatum.

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Vart 4:e år eller vid behov

### 5. Batteri

Byte.

- Se Ref 1 avsnitt "Installation av batteriet" sid 2-2 - 2-3 (sid 15-16).
- Se Ref 3 avsnitt "INSTALLING THE BATTERY AND SETTING THE CLOCK" sid 2-2 - 2-3 (sid 14-15).

### 6. Hela enheten

Kontrollera självttestresultat efter batteribyte.

- Se Ref 1 avsnitt "Köra självttestet efter batteriinstallation" sid 2-5 (sid 18).
- Se Ref 3 avsnitt "BATTERY INSERTION SELFTTEST" sid 4-5 - 4-7 (sid 27-29).

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER