

DEFIBRILL MINDRE

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7838-535010	DEFIBRILL MINDRE
M7838-538010	DEFIBRILL MDRE AUT

Allmänt

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-031551	ANVMAN DEFIBRILLAT	Alla
2	M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV	Alla
3	M7777-716450	TL F M7838-535011	M7838-535010 ingående i M7838-535011
4	M7777-712930	TL F M7838-535012-1	M7838-535010 ingående i M7838-535012
5	M7777-714660	TL F M7838-538011-0	M7838-538010

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	0 °C till 40 °C	Alla
Transport- och förvaringstemperatur	-20 °C till 50 °C	Alla
Övrig information	Se Ref 1 avsnitt "7 Tekniska data" sid 32-34 (sid 34-36)	Alla

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2 % M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	-	Luddfri trasa	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Vid upprättande
 - 1 Batteri, kontroll monterat.
Se Ref 1 avsnitt "3.1.1 Sätta i batteriet" sid 16 (sid 18).
 - 2 Elektroder, kontroll utgångsdatum.
 - 3 Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt "6.2.1 Rengöring av höljet" sid 29 (sid 31).
Använd Vårdmateriel nr 1 eller 2 med nr 3. Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.
- Hela enheten
Okulärbesiktning avseende skador, fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Batteristatus
Kontroll.
Se Ref 1 avsnitt "2.3 Skärm" sid 11 (sid 13).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Defibrillator
Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt "6.2.1 Rengöring av höljet" sid 29 (sid 31).
Använd Vårdmateriel nr 1 eller 2 med nr 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.
- Tillbehör
Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt Ref 2 samt nedanstående punkter.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Batteri Demontering.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall	Förlängd vårdperiod
Varje månad/Var fjärde månad	Tillämpas ej.

Varje månad

1. Hela enheten
Okulärbesiktning avseende skador, fastsättning
2. Elektroder
Kontroll utgångsdatum
3. Batteri
Kontroll utgångsdatum.
Se Ref 1 avsnitt "3.1.1 Sätta i batteriet" sid 16 (sid 18).
4. Defibrillator
Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt "6.2.1 Rengöring av höljet" sid 29 (sid 31).
Använd Vårdmateriel nr 1 eller 2 med nr 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var fjärde månad

5. Defibrillator
Funktionstest.
Se Ref 1 avsnitt "6.1.2 Funktionstest" sid 27 (sid 29).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Kalenderstyrda tillsyner - Långa intervall

B1 - Var sjätte månad eller vid behov

6. Batteri
Kontroll batteristatus.
7. Batteri
Byte vid för låg kapacitet eller om utgångsdatumet passerats.
Se Ref 1 avsnitt "3.1.1 Sätta i batteriet" sid 16 (sid 18).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER