

AUTOKLAV

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7830-278110	AUTOKLAV

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-031101	ANVMAN STERILUTR	M7830-278110
2	M7786-031131	ANVMAN STERILUTR	M7830-278110
3	M7786-032581	ANVMAN AUTOKLAV	M7830-278110

Daglig tillsyn

Före användning

- Autoklav Om autoklaven har varit avstängd mer än en dag, kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Vattentank Kontrollera, nivå
- Kammarens utlopp, sil Kontrollera, rengör

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Rengör

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Körning Kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare regelbundet, dock minst två gånger per månad.
- Avställningsprocedur Vid frysrisk, genomför avställningsprocedur. Se Ref 3.
- Avfuktning Materielen ska förvaras i avfuktat utrymme.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Efter 30 processer eller minst varje vecka

1. Utsida Rengör
2. Kammaren Rengör, trasa
3. Tank Byt vatten, rengör, tank & sil

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

4. Autoklav Läcktest. Se Ref 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER