

BLOD/VÄTSKEVÄRMARE

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7858-210010	INFPUMP MINDRE
M7869-670010	BLOD/VÄTSKEVÄRMARE
M7869-677010	BLODVÄTSKE MINDRE

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-038711	ANVMAN INFPUMP EN	M7858-210010 ingående i M7858-210011 och M7858-210012
2	M7786-031492	ANVMAN BLODVÄTSKE	M7869-670010 ingående i M7869-670011 och M7869-670012
3	M7786-039101	ANVMAN BLODVÄTSKE	M7869-677010 ingående i M7869-677011
4	M7786-039531	ANVMAN BLODVÄTSKE	M7869-677010 ingående i M7869-677012
5	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla
6	M7777-714890	TL F M7858-210011-3	M7858-210010 ingående i M7858-210011
7	M7777-715090	TL F M7858-210012-1	M7858-210010 ingående i M7858-210012
8	M7777-711620	TL F M7869-670011-3	M7869-670010 ingående i M7869-670011
9	M7777-713040	TL F M7869-670012-1	M7869-670010 ingående i M7869-670012
10	M7777-714880	TL F M7869-677011-6	M7869-677010 ingående i M7869-677011
11	M7777-715100	TL F M7869-677012-4	M7869-677010 ingående i M7869-677012

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	-	M7869-210010
	15 °C till 40 °C	M7869-670010
	-5 °C till 50 °C	M7869-677010
Transport- och förvaringstemperatur	-	M7869-210010
	-20 °C till 45 °C	M7869-670010
	-30 °C till 70 °C	M7869-677010
Övrig information	Se Ref 2 avsnitt "Specifikationer" sid 142 (sid 142).	M7869-670010
	Se Ref 3 avsnitt "Bilaga A: Tekniska specifikationer" sid 21-23 (sid 21-23).	M7869-677010 ingående i M7869-677011
	Se Ref 4 avsnitt "Appendix A: Technical Specifications" sid 18-23 (sid 18-23).	M7869-677010 ingående i M7869-677012

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	M7869-670010, M7869-677010
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2 % M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	M7869-670010, M7869-677010
3	-	Luddfri trasa	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten
Kontroll skador och fastsättning, rengöring vid behov.
 - Se Ref 1 avsnitt "Routine Maintenance" sid 17 (sid 18).
Använd Vårdmateriel nr 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.
 - Se Ref 2 avsnitt "Rengöring av Ranger uppvärmningsenhet för blod/vätska" sid 140-141 (sid 12-13).
Använd Vårdmateriel nr 1, 2 och 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.
 - Se Ref 3 avsnitt "Rengöring av komponenterna i enFlow värmarsystem för IV-vätska/blod" sid 13-14 (sid 13-14).
Använd Vårdmateriel nr 1, 2 och 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.
 - Se Ref 4 avsnitt "Cleaning the enFlow IV Fluid/Blood Warming System Components" sid 14-15 (sid 14-15).
Använd Vårdmateriel nr 1, 2 och 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Indikeringar och larm
Kontroll.
 - Se Ref 1 sid 5-7 (sid 6-8).
 - Se Ref 2 avsnitt "Säkerhetsfunktioner" sid 134-135 (sid 6-7).
 - Se Ref 3 avsnitt "Indikatorer på och användning av enFlow kontrollenhet (modell 121-serien)" sid 11-12 (sid 11-12) och avsnitt "Indikatorer på och användning av enFlow värmare (modell 100-serien)" sid 12-13 (sid 12-13).
 - Se Ref 4 avsnitt "enFlow Warmer (MODEL 100 Series) Indicators and Operation" sid 12-13 (sid 12-13).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten
Kontroll skador och fastsättning, rengöring vid behov.
 - Se Ref 1 avsnitt "Routine Maintenance" sid 17 (sid 18).
Använd Vårdmateriel nr 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.
 - Se Ref 2 avsnitt "Rengöring av Ranger uppvärmningsenhet för blod/vätska" sid 140-141 (sid 12-13).
Använd Vårdmateriel nr 1, 2 och 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.
 - Se Ref 3 avsnitt "Rengöring av komponenterna i enFlow värmarsystem för IV-vätska/blod" sid 13-14 (sid 13-14).
Använd Vårdmateriel nr 1, 2 och 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.
 - Se Ref 4 avsnitt "Cleaning the enFlow IV Fluid/Blood Warming System Components" sid 14-15 (sid 14-15).
Använd Vårdmateriel nr 1, 2 och 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 3.
- Tillbehör
Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring
Se Ref 5.
- Förvaringstemperatur
Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 3.
- Avfuktning
Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M7858-210010; batterier
Demontering.
Se Ref 1 avsnitt "Change batteries" sid 16 (sid 17).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER