

# THORAXDRÄNAGESUG

## MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7835-322010	THORAXDRÄNAGESUG
M7835-325010	THORAXDRÄNSUG 2

### Allmänt

#### — VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

### Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-038221	ANVMAN THORAXDR	M7835-322010
2	M7777-714260	TL F M7835-322011-6	M7835-322010
3	M7780-009521	BANV THORAXDRÄNS 2	M7835-325010
4	M7777-716140	TL F M7835-325011	M7835-325010
5	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla

## Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	-5 °C till 40 °C	M7835-322010
	5 °C till 40 °C	M7835-325010
Transport- och förvaringstemperatur	-20 °C till 50 °C	Alla
Övrig information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Ref 1 avsnitt "Tekniska specifikationer" (sid 2).</li> <li>• Se Ref 3 avsnitt "17 Tekniska specifikationer" sid 299 (sid 299).</li> </ul>	

## Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

## Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	M7835-322010
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	M7835-322010
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	M7835-322010

### Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

## Daglig tillsyn

### Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.  
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Hela enheten Funktionskontroll.
  - Se Ref 1 avsnitt "Utför funktionskontroll" sid 114 (sid 10).
  - Se Ref 3 avsnitt "7.5 Utför funktionskontroll" sid 277-278 (sid 277-278).
- Vid batteridrift Laddning batteri.
  - Se Ref 1 avsnitt "XVI Strömförsörjning / Batterihantering" sid 125 (sid 21).
  - Se Ref 3 avsnitt "Ladda batteriet" sid 261 (sid 261).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Under användning

- Vid batteridrift Kontroll batteristatus.
  - Se Ref 1 avsnitt "V Översikt Thopaz" sid 111 (sid 7).
  - Se Ref 3 avsnitt "Batteriet urladdat" sid 262 (sid 262).
- Hela enheten Kontrollera larm och larmmeddelanden.
  - Se Ref 1 avsnitt "XII Larm" sid 121-122 (sid 17-18).
  - Se Ref 3 avsnitt "12 Felsökning och larm" sid 292-294 (sid 292-294).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
  - Se Ref 1 avsnitt "XV Rengöring" sid 124 (sid 20).
  - Se Ref 3 avsnitt "13 Riktlinjer för rengöring" sid 294-295 (sid 294-295).Använd vårdmateriel nr 1, nr 2 och nr 3.  
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
- Tillbehör Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 5.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Batteri Laddning batteri var sjätte månad.
  - Se Ref 1 avsnitt "XVI Strömförsörjning / Batterihantering" sid 125 (sid 21).
  - Se Ref 3 avsnitt "Ladda batteriet" sid 261 (sid 261).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Var sjätte månad

1. Hela enheten Laddning batteri.
  - Se Ref 1 avsnitt "XVI Strömförsörjning / Batterihantering" sid 125 (sid 21).
  - Se Ref 3 avsnitt "Ladda batteriet" sid 261 (sid 261).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER