

BÅRKÄRRA NATO

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7812-122010	BÅRKÄRRA SJUKB NATO
M7812-122110	BÅRKÄRRA NATO 2

Allmänt

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7780-006651	BANV BÅRKÄRRA	M7812-122010
2	M7786-049911	BANV BÅRKÄRR EL3000	M7812-122110
3	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla
4	M7777-713410	TL F M7812-122011-7	M7812-122010
5	M7777-716500	TL F M7812-122111	M7812-122110

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2 % M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla
4	M0743-020145	LAGERFETT 020	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hel enhet Kontroll skador och fastsättning.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hel enhet Kontroll skador och fastsättning.
- Hel enhet Rengöring.
 - Se Ref 1 avsnitt "2.3 Maintenance and care" sid 5 (sid 5).
 - Se Ref 2 avsnitt "Vård" sid 16 (sid 18). Använd Vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3. Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 3.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Var tredje månad eller vid behov

1. Hjulens axeltappar och låsningar Smörjning.
 - Se Ref 1 avsnitt “2.3 Maintenance and care” sid 5 (sid 5).
 - Se Ref 2 avsnitt “Vård” sid 16 (sid 18).
Använd Vårdmateriel nr 4.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER